

# FAUTEUIL DE DOUCHE FORMENTERA - 822007

## MANUEL D'INSTRUCTIONS




Dimensions hors tout : Largeur 55.5 x Profondeur 101 cm  
Hauteur ajustable : 118 à 123 cm  
Dimension assise : Largeur 43.5 x profondeur 43.5 x hauteur 55.5 à 60.6 cm  
Charge maximale : 136 kg  
Structure en aluminium anti-corrosion  
Poids : 14.5 kg  
Diamètre des roues : 12.5 cm

### **Avertissement de sécurité Générale**

Veillez-vous assurer que ces instructions sont entièrement lues et comprises. Le non-respect de ce manuel peut entraîner des blessures pour l'utilisateur. Conserver dans un endroit sûr pour une future utilisation.

*(Vers. Février-2020)*

## 1. DESCRIPTION

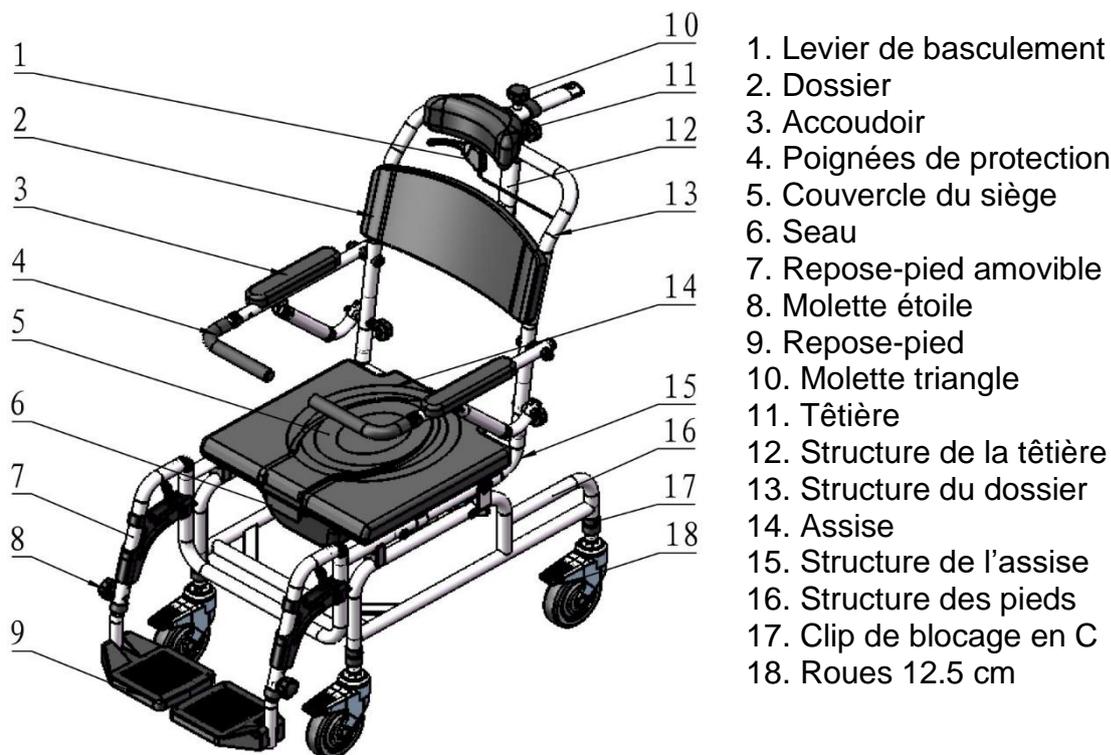

## 2. PRECAUTIONS DE SECURITE - VERIFICATIONS PREALABLES

Assurez-vous que le Fauteuil de Douche Formentera est bien déplié et verrouillé avant l'utilisation.

Assurez-vous que toutes les pièces soient bien verrouillées et que les pièces amovibles soient en bon état de fonctionnement.

## 3. ASSEMBLAGE

- a) Insérez la structure du dossier dans la structure de l'assise comme montré sur l'image 1. Une fois correctement en place, verrouiller à l'aide des molettes étoiles.
- b) Installez les quatre roulettes et fixez-les avec les clips en C (voir image 2)
- c) Installez les repose-pieds amovibles sur la structure de l'assise (image 3)
- d) Insérez les poignées de protection dans les tubes des accoudoirs (image 4)
- e) Insérez la structure de la têteière dans la structure de l'assise et verrouillez-la avec la molette en triangle (image 5)

f) Installez la tête dans la structure de tête ovale et fixez-la à l'aide de la molette en triangle (image 6)



Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6

## 4. VERIFICATIONS

Avant d'utiliser le fauteuil de douche Formentera, assurez-vous :

- Que le fauteuil soit correctement assemblé
- Que tous les composants du fauteuil soient correctement fixés
- Que le fauteuil ne présente aucun défaut d'aspect

## 5. UTILISATION

- a) Pour ajuster la distance et la hauteur de la tête, déverrouillez la molette en triangle, ajustez puis refixez à l'aide de la molette.
- b) Pour incliner le fauteuil vers l'arrière :
  - Bloquez tout d'abord tous les freins situés sur chacune des roulettes pour vous assurer que le fauteuil de douche reste bien en place
  - Ensuite, appuyez sur le levier de basculement pour incliner le fauteuil vers l'arrière. Le fauteuil de douche Formentera s'incline de 97° à 125°.
- c) Lors de l'installation de l'utilisateur, relevez les poignées de protection et remettez-les ensuite en position initiale.

## 6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

### Entretien

- ✓ Nettoyer régulièrement le fauteuil avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergents ou de produits solvantés.
- ✓ Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- ✓ S'assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation de saletés ou de débris autour de l'essieu, des freins ou des roues.
- ✓ Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du phénol ou du chlore, car cela pourrait endommager les matériaux en aluminium et en polyamide.
- ✓ Lubrifier les roues avec un peu d'huile si celles-ci grincent.

### Maintenance

- ✓ Vérifier régulièrement que toutes les vis soient correctement fixées et serrées.
- ✓ Vérifier que les freins fonctionnent bien avant chaque utilisation.
- ✓ En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le fauteuil soi-même. Consultez un revendeur agréé.

Fabriqué en PRC – Importé par : ADYS – 330, allée des Hêtres – 69760 Limonest