

## SIEGE DE BAIN SICILE

REF : 812213 / 812193

### MONTAGE ET DÉMONTAGE

Placez le siège de bain dans la position désirée.

Lors du retrait du bain, tirez d'abord les languettes sur les ventouses pour les dégager puis soulevez le siège du bain.

### UTILISATION DU SIÈGE DE BAIN

Assurez-vous de lire la section sécurité avant d'utiliser le siège de bain.

Le siège de bain est disponible en 15, 20 ou 30 cm de hauteur et dispose de 5 lattes d'assise.

Ils sont conçus pour permettre à l'utilisateur de s'asseoir et de se baigner, de se laver ou de se doucher confortablement. Ils ont une limite de poids de 190 kg.

Consultez votre professionnel de la santé pour obtenir des conseils sur l'utilisation sécuritaire du produit.

### NETTOYAGE DU SIÈGE DE BAIN

Retirez le siège du bain avant de le nettoyer.

Toutes les parties du siège de bain doivent être nettoyées périodiquement avec des détergents ménagers normaux.

Lorsqu'une désinfection est nécessaire, un désinfectant doux qui n'endommagera pas les matières plastiques doit être utilisé uniquement.

Les produits acides, alcalins ou de nettoyage puissant peuvent endommager ou décolorer le produit.

Après le nettoyage ou la désinfection, les pièces doivent être nettoyées ou essuyées avec un chiffon humide avant que le siège de bain ne soit réinstallé.

Le nettoyage à l'autoclave n'est pas recommandé car il peut endommager les plastiques spéciaux utilisés dans la construction du siège de bain.

### SÉCURITÉ DU SIÈGE DE BAIN

- Le siège de bain ne doit être utilisé que comme aide à l'assise. Ne vous tenez pas debout et n'utilisez pas le siège de bain à mauvais escient.
- Ne dépassez pas la limite de poids du siège.
- Certains utilisateurs et enfants peuvent avoir besoin d'être surveillés pendant qu'ils utilisent le siège de bain.
- Gardez les mains et les doigts à l'écart des interstices entre les lamelles du siège.
- S'assurer que les ventouses empêchent tout mouvement dans le bain.

### SPÉCIFICATIONS

Référence	Largeur	Profondeur	Hauteur
812213	45cm	29cm	20cm
812193	45cm	29cm	30cm

Le poids maximal de l'utilisateur pour tous les sièges de bain à lamelles est de 190 kg.

Les sièges de bain sont fabriqués en plastique PVC robuste et léger.