

# NOTICE D'UTILISATION

## Rollator aluminium *Ultra light* (SA 131 4001)



Vous avez choisi d'acquérir un produit de Drive DeVilbiss Healthcare France : le rollator ULTRALIGHT ; nous vous en remercions et vous félicitons de ce choix. Nous vous convions à lire cette notice d'utilisation et d'entretien afin de mieux connaître les performances et les qualités de ce rollator.

**Mise en garde :** La corrélation entre la pathologie du patient et le type de produit à utiliser doit être faite par un professionnel de la santé. Ne pas utiliser le rollator avant d'avoir reçu, de la part du professionnel, une formation et des consignes de sécurité.



### AVERTISSEMENTS :


- Seuls les patients dont le poids n'excède pas 136 kg peuvent bénéficier de ce rollator.
- L'utilisation sur un sol irrégulier, de mauvaise qualité, inégal ou en pente est à proscrire absolument sous peine de faire basculer le patient.
- La mise en service doit se faire avec le concours d'une personne habilitée qui procédera aux réglages de l'appareil, adaptés à la morphologie et aux besoins de l'utilisateur.

### MISE EN SERVICE ET UTILISATION :

#### Montage :

- Sortir toutes les pièces du carton.
  - Déplier le cadre.
  - Insérer les roues avant en veillant à positionner les fourches vers l'extérieur lorsque le rollator est en mouvement.
- Etiquette **R** = côté droit  
Etiquette **L** = côté gauche


**Attention :** S'assurer que les 2 boutons poussoirs sont correctement et complètement enclenchés.

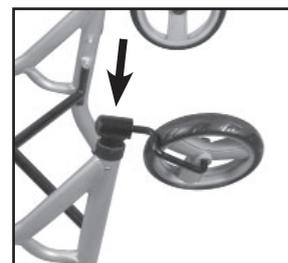

- Redresser le cadre et insérer les roues arrière, en s'assurant que les roues soient positionnées côté extérieur et que les câbles de frein passent à l'extérieur du cadre.

Si le patin de frein frotte sur la roue, redémonter l'ensemble et détourner le câble de quelques tours. Le réglage du câble s'effectue au niveau de l'écrou situé à sa base et/ou côté poignée.

**Attention :** S'assurer que les 2 boutons poussoirs sont correctement et complètement enclenchés.

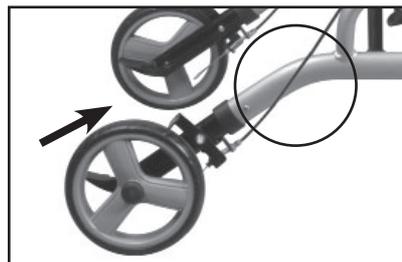

#### ● Sangle dorsale :

Positionner la sangle en insérant de chaque côté les fixations dans les glissières des supports situés au niveau des poignées (photo 1).

Ajuster les supports à la hauteur souhaitée.

**Attention :** S'assurer avant chaque utilisation que la sangle est bien correctement insérée et que les 2 supports sont complètement vissés. Respecter le sens de montage de la sangle (broderie placée vers l'extérieur).

- Ajuster la hauteur des poignées (photos 2) (repères 1 à 5 sur les tubes).


**Attention :** S'assurer que les 2 poignées sont à la même hauteur et que les 2 boutons de fixation sont correctement et complètement vissés.



#### Ouverture et fermeture :

- Pour déplier le rollator, appuyer de chaque côté du siège jusqu'à entendre un « clic ».
- Pour plier le rollator, tirer sur la sangle située sur l'assise.

**Attention :** S'assurer que le crochet de blocage situé sous le siège soit correctement et complètement enclenché afin de verrouiller le rollator en position dépliée.

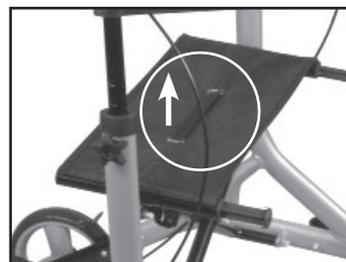

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

### Freins :

- Pour ralentir le rollator lors de l'utilisation, tirer les leviers de frein vers le haut.
- Frein de parking : pour verrouiller les freins de parking, pousser les leviers vers le bas jusqu'au « clic ».

**Attention : les freins de parking doivent toujours être verrouillés avant de s'asseoir sur le siège du rollator**



### Sac :

- Accrocher le sac sur les supports prévus à cet effet à l'avant du rollator.



### IMPORTANT :

- Le professionnel de santé doit s'assurer que le patient a les facultés mentales et physiques suffisantes pour utiliser en toute sécurité le rollator.
- Avant de confier le rollator au patient, vérifier la stabilité du cadre, la tenue de la sangle dorsale et de ses 2 supports ainsi que l'efficacité du système de freinage et du verrouillage en position ouverte.
- S'asseoir sur le siège uniquement depuis l'intérieur du rollator et non pas par le devant. Ne pas se mettre debout sur le siège.
- Ne pas mettre trop de poids dans le sac (maximum 5 kg) afin de conserver toute la mobilité et fonctionnalité du rollator et éviter tout basculement.

### UTILISATION :

- Avant d'utiliser le rollator pour la première fois, vérifier que la hauteur de la sangle dorsale et des poignées est bien adaptée.
- Le positionner devant soi, tenir fermement les poignées tout en maintenant les leviers de frein. Lorsque le corps est en équilibre, relâcher les leviers de frein, pousser lentement le rollator vers l'avant puis freiner à nouveau (en tirant les leviers de frein vers le haut). Lorsque le rollator est parfaitement immobilisé, avancer à l'intérieur du rollator jusqu'à retrouver la position d'équilibre.
- Pour une station debout prolongée, immobiliser le rollator en abaissant les leviers de frein.
- Avant chaque utilisation vérifier la stabilité, le freinage et que le rollator est correctement verrouillé en position dépliée.

### ENTRETIEN RÉGULIER :

- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage.
- Nettoyage du sac : utiliser de l'eau ou un nettoyant doux.
- Vérifier régulièrement l'état du système de freinage, l'état et la tenue de la sangle dorsale et des roues ; les remplacer dès qu'ils sont dégradés ou usés.
- Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage, des tubes, des soudures et l'efficacité du freinage.  
**Seul un technicien habilité peut procéder à la maintenance et au remplacement de pièces fournies exclusivement par Drive DeVilbiss Healthcare France.**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**POIDS MAXIMUM UTILISATEUR :**  = 136 kg

- Dimensions hors tout (Lxpxh) : ..... 64 x 72 x 83 cm (mini)/93 cm (maxi)
- Encombrement minimum plié (Lxpxh) : .....27 x 72 x 83 cm
- Hauteur poignée réglable (5 positions - pas = 2,5 cm) : .....de 83 à 93 cm
- Largeur entre poignées : .....48 cm
- Hauteur assise : .....56 cm
- Matière : ..... aluminium, plastique
- Poids : .....5,2 kg
- Charge max. supportée par le sac : .....5 kg
- Porte-canne de série.



### CONDITIONS DE GARANTIE :

Le rollator est garanti un an. Cette garantie correspond à un emploi normal du produit et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Drive DeVilbiss Healthcare France.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.



Distributeur : Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie - ZAC du Ban la Dame  
BP19 - 54390 FROUARD - FRANCE  
Tél : 03 83 495 495 - Fax : 03 83 495 496



Ralon Medical Equipment Co., Ltd  
Xilian development zone, Jinsha, Danzao town,  
528222 Foshan, Guangdong - CHINE



Obelis S.A. - O.E.A.R.C.  
Bd Général Wahis 53  
1030 Bruxelles - BELGIQUE

**drive**  
**DeVilbiss**  
HEALTHCARE