

## Instruction d'installation et d'utilisation ROLLATOR FOXI ET FIXI

1

### 1. Déplier le Rollator

Placez le rollator sur les roues avant et déroulez le châssis où sur trouvent les roues arrière afin de déplier le rollator (Fig 1.)  
Le rollator est convenablement déplié et peut être utilisé lorsque vous entendez le loquet de verrouillage. (position Fig. 2.)

### 2. Ajustez les poignées-Fig. 3

Vous pouvez régler la hauteur des poignées en dévissant de chaque côté du châssis les vis de fixation ©. Réglez à la hauteur souhaitée puis remettre les vis de fixation en les resserrant correctement. Veillez à mettre la même hauteur de chaque côté.

### 3. Utilisation des freins-Fig. 4

A l'usage, en remontant les freins vers les poignées (G), vous actionnez les freins. Dès que vous relâchez, les freins ne sont plus en fonction. Pour le stationnement (frein de parking), il faut pousser les 2 freins vers le sol (H). Ils restent en cette position et les freins de parking sont maintenus jusqu'à ce que vous les déverrouillez en les remontant à leur position initiale.

### 4. Plier le rollator

Pour plier le rollator, tirez sur la cordelette rouge au milieu du châssis (J) et rassemblez les 4 roues ensemble pour plier le rollator au maximum de sa capacité.

### 5. Utilisation du siège (accessoire)-Fig. 2

Le siège (M) doit être vissé fermement sur le châssis (F).



- Avant d'installer le siège, mettre les freins de parking.
- Si la température extérieure est vraiment élevée, le siège peut être très chaud et il est impératif de tester la température du siège avant de s'asseoir avec votre main.

### 6. Ajuster les freins-Fig. 5

Vous pouvez resserrer ou desserrer les freins grâce au vis K et L. Les freins doivent être contrôlés régulièrement.



### Garantie

Le délai de garantie du rollator est de 24 mois à compter de la date d'achat, sous la condition d'une utilisation normale d'utilisation.

Figure:

