



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR À QUI LE DISPOSITIF S'ADRESSE :

L'utilisateur doit être capable de : lire et comprendre les instructions, les avertissements et les mises en garde.

UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS : en post-opératoire après réparation de la coiffe des rotateurs, interventions de Bankart, déplacements capsulaires, luxations/subluxations gléno-humérales, distensions/réparations de tissus mous.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE : En cas de douleur, d'enflure, d'altération des sensations ou de toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.

TAILLES ET CONFIGURATION :

Écharpe de bras : Pour dimensionner l'écharpe de bras, mesurez la distance entre le pli du coude et la base de l'index.

TAILLE DE L'ÉCHARPE DE BRAS	MESURE
S/M	10,5"-15" (26,7 cm - 38,1 cm)
L/XL	15" et + (38,1 cm et +)

L'écharpe de bras est fournie en configuration L/XL. Pour ajuster l'écharpe de bras à la taille S/M, défaire les deux boucles à attache rapide. Replier l'écharpe de bras et faire adhérer les bandes auto-agrippantes à l'intérieur de l'écharpe.

Configuration droite vers gauche : L'UltraSling PRO est fournie en configuration adaptée à une lésion du bras droit. Pour régler la sangle d'épaule pour une lésion du bras gauche, défaire les deux boucles à attache rapide à l'avant de l'écharpe de bras et détacher le coussin de l'écharpe de bras. Appliquer le coussin sur le côté gauche du corps en retournant le coussin de sorte que l'extrémité la plus fine pointe vers l'arrière du coude gauche. Enrouler la ceinture autour de la taille et fixer l'écharpe de bras sur le coussin. Glisser la sangle d'épaule sur l'épaule droite. Placer le bras dans l'écharpe et refermer les boucles à attache rapide.

Ceinture : L'UltraSling PRO est adaptée pour les tours de taille allant de 63,5 cm à 160 cm. Régler la ceinture et couper l'excédent si nécessaire pour obtenir l'ajustement souhaité.

Coussin facultatif : L'UltraSling PRO peut être portée sans le coussin. Retirer l'arrière de la ceinture du coussin et faire adhérer la sangle en Y des deux côtés de l'écharpe de bras au niveau du coude. Pour la partie frontale de la ceinture, retirer la boucle à attache rapide du coussin et faire adhérer la sangle en Y à l'écharpe de bras. Couper la ceinture si nécessaire.

APPLICATION :

Pour garantir un bon ajustement, le produit doit être adapté au patient avant l'opération, si possible.

- Défaire la boucle à attache rapide (i) du coussin et la sangle d'avant-bras (ii) de l'écharpe de bras. Détacher la sangle d'épaule en libérant les boucles à attache rapide (iii) à l'avant de l'écharpe. (Fig. A).
- Aligner le coussin sur le côté blessé au niveau de la taille/de la hanche avec le coude à 90°. L'extrémité étroite du coussin doit être positionnée à l'arrière de l'avant-bras/du coude. Enrouler la ceinture au dos et la fixer à la boucle à attache rapide à l'avant du coussin. Régler la ceinture et couper l'excédent si nécessaire pour obtenir l'ajustement souhaité. (Fig. B).

- Placer l'av ant-bras dans l'écharpe de bras le plus en arrière possible. Fixer la sangle de pouce (iv) entre le pouce et l'index à l'avant de l'écharpe. Fixer la sangle d'avant-bras à l'écharpe et au coussin. (Fig. C).
- Glisser la sangle d'épaule sur l'épaule qui n'est pas blessée. Régler la longueur de la sangle d'épaule pour obtenir l'ajustement souhaité. (Fig. D)
REMARQUE : La bande auto-agrippante située sur la sangle d'épaule doit être orientée vers le haut et vers l'avant.
- Attacher la sangle d'épaule à l'écharpe de bras à l'aide des boucles à attache rapide (iii). Régler la longueur de la sangle d'épaule et de la sangle arrière pour obtenir l'ajustement souhaité. (Fig. E).

RETRAIT DE L'ORTHÈSE :

Pour retirer l'UltraSling PRO, défaire les boucles à attache rapide, retirer la sangle d'avant-bras, la sangle de pouce et la ceinture. Retirer lentement l'orthèse.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET DE STOCKAGE :

	Laver à la main à l'eau (86°F/30°C) et au savon doux. Laisser sécher à l'air libre. REMARQUE : Si le produit n'est pas suffisamment rincé, des résidus de savon peuvent provoquer des irritations et endommager le matériau.
	NE PAS repasser.
	NE PAS nettoyer à sec.
	NE PAS utiliser d'eau de javel.

COMPOSITION DES MATÉRIAUX : nylon, polypropylène, mousse de polyuréthane, coton, mousse/tissu stratifié, polyacétal, polyester, acétal.

GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat. Si les conditions de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions des réglementations locales s'appliquent.

**PRÉVU POUR UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT.
FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.**

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.