



## FRANÇAIS

**LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.**

### UTILISATION/INDICATIONS :

L'orthèse AirLift PTTD est conçue pour assurer un soutien lors des affections du tendon du jambier postérieur (PTTD) en Phase I et début de Phase II, ou lors des premiers signes ou symptômes de pieds plats chez l'adulte. Cette orthèse peut également être utilisée en traitement postopératoire et pendant la rééducation.

### CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES :

Produit en textile/matériau semi-rigide conçu pour restreindre le mouvement grâce à une construction élastique ou semi-rigide.

**CONTRE-INDICATIONS :** L'orthèse AirLift PTTD n'est pas indiquée pour les patients souffrant d'entorses ou de fractures par inversion.

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

Ne pas gonfler excessivement les coussins d'air. Un gonflage incorrect des coussins d'air peut causer une irritation cutanée importante chez les patients souffrant de neuropathie diabétique. Réduire la compression des coussins d'air dès que des changements cutanés apparaissent ou qu'une gêne est ressentie. Ne pas utiliser ce produit sur des patients incapables de communiquer une gêne physique. Le changement d'altitude peut avoir un effet sur la pression des coussins d'air. Ajuster les sangles ou la compression des coussins d'air (voir « Compression des coussins d'air » dans le mode d'emploi) pour obtenir un ajustement confortable.

- 1) Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
- 2) En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation ou d'autres réactions anormales lors de l'utilisation de ce produit, contacter immédiatement un médecin.
- 3) Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

**Remarque :** Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave découlant de l'utilisation de ce dispositif.

### CONSEILS D'APPLICATION :

#### 1. PRÉPARER L'ORTHÈSE

Desserrer les sangles et ouvrir l'orthèse.

#### 2. POSER L'ORTHÈSE

Enfiler une chaussette. Glisser le pied dans la partie arrière de l'orthèse en commençant par les orteils. Tirer les coquilles de l'orthèse vers le haut et aligner les coques sur les côtés de la cheville (Fig. 1). Enrouler la sangle inférieure par l'arrière de la cheville et ajuster fermement (Fig. 2). Tirer les sangles de support plantaire jusqu'à un ajustement ferme sous la cambrure du pied. Enrouler la sangle de support plantaire par l'arrière de la cheville vers l'avant de la cheville et ajuster fermement (Fig. 3). Chausser une chaussure à lacets ou une chaussure de sport. Pour corriger l'ajustement, serrer ou desserrer la sangle de support plantaire.

#### 3. AJUSTER LA COMPRESSION DES COUSSINS D'AIR

Le coussin d'air AirLift n'est pas gonflé dans l'emballage. Pour gonfler le coussin d'air, appuyer fermement sur la poire de gonflage se trouvant sur le côté de l'orthèse jusqu'à ce que celle-ci soit bien ajustée, tout en étant confortable (Fig. 4a). En cas de gonflage excessif, dégonfler le coussin d'air. Pour le dégonfler, appuyer sur le bouton situé sur le côté de l'orthèse (Fig. 4b).

### AVERTISSEMENT

Comme avec tous les immobilisateurs d'extrémités, tels que les plâtres ou orthèses, les patients insensibles (c'est-à-dire des patients en phase postopératoire souffrant de neuropathies, etc.) doivent être étroitement surveillés par des professionnels de la santé pour le traitement de « points chauds » d'irritations cutanées, de blessures ou de dyschromie de la peau. Les patients souffrant d'infections ou d'ulcères doivent obtenir l'avis d'un professionnel de la santé avant d'utiliser l'orthèse.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

La totalité de l'orthèse AirLift PTTD est lavable à la main dans de l'eau froide, avec un savon doux. Sécher à l'air libre.

**GARANTIE :** DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou une partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

**FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.**

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.