

GUIDE D'UTILISATION :

Rollator **BOSTON** (SA 130 1101 : rouge / SA 130 1101-BL18 : bleu)




Vous venez d'acquérir un produit de Drive DeVilbiss Healthcare France : le rollator 4 roues BOSTON ; nous vous en remercions et vous félicitons de ce choix. Nous vous convions à lire ce guide d'utilisation et d'entretien afin de mieux connaître les performances et les qualités de ce rollator.

Mise en garde : La corrélation entre la pathologie du patient et le type de produit à utiliser doit être faite par un professionnel de santé. Ne pas utiliser le rollator avant d'avoir reçu, de la part du professionnel, une formation et des consignes de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT :

- Seuls les patients dont **le poids n'excède pas 120 kg** peuvent utiliser ce rollator.
- L'utilisation sur un sol irrégulier, de mauvaise qualité, inégal ou en pente est à proscrire absolument sous peine de faire basculer le patient.
- La mise en service doit se faire avec le concours d'une personne habilitée qui procédera aux réglages de l'appareil, adaptés à la morphologie et aux besoins de l'utilisateur.

PRÉSENTATION DU PRODUIT :

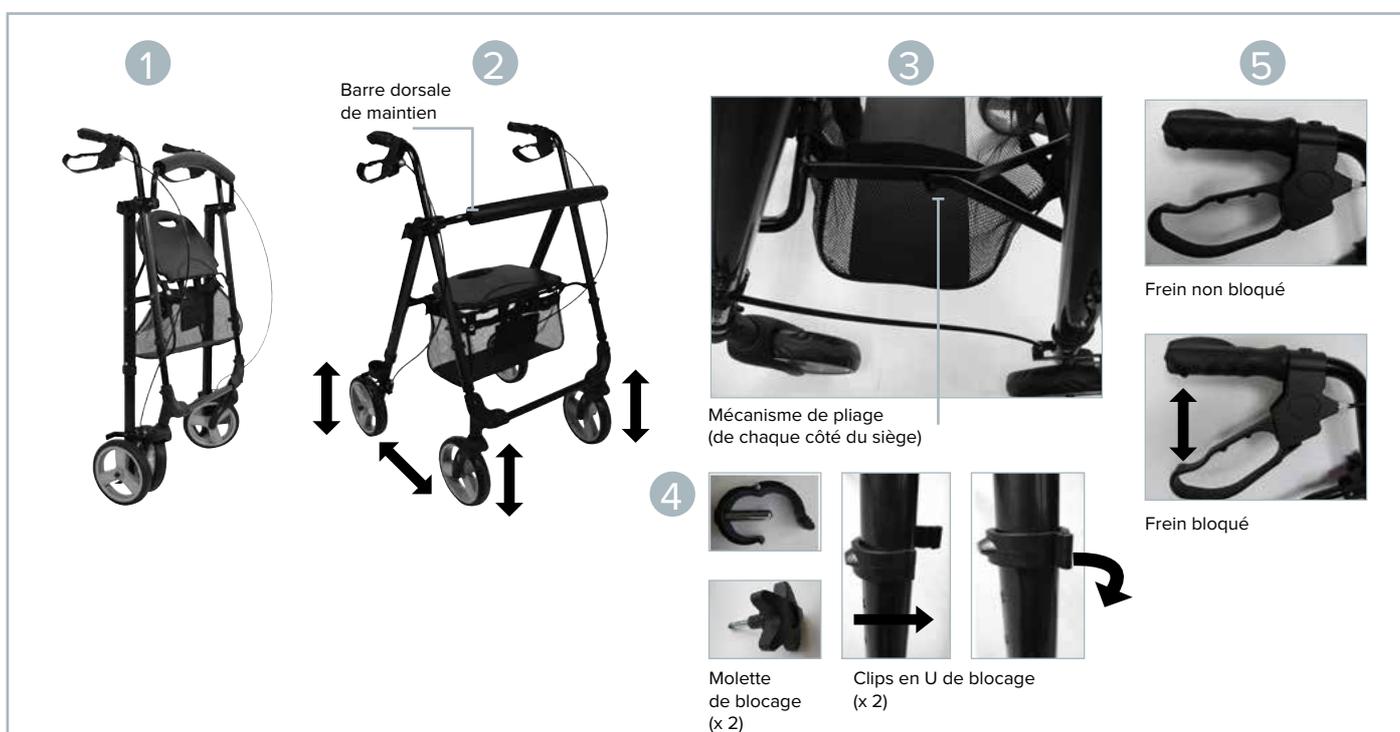

- Le châssis est livré plié (photo n°1). Les roues, les poignées et la barre dorsale sont fournies non montées. Un porte-canne est fixé sur le châssis.

- Déplier le châssis, abaisser le siège rigide et son support vers le sol en écartant simultanément les deux demi-côtés (photo n°2) jusqu'à ce que le mécanisme de pliage (photo n°3) et le siège soient complètement à l'horizontal.

- Retirer les 2 clips en U (photo n°4) situés à l'avant du châssis (côté tubes ronds) puis insérer la structure composée des roues pivotantes reliées par une barre transversale. Respecter le sens de montage pour que les roues soient orientées dans la bonne direction (photo n°2).

- Adapter, à l'arrière du châssis, les roues reliées par le câble de frein et insérer les poignées. Respecter aussi le sens de montage (les manchons des poignées sont profilés selon le côté droit ou gauche) et veiller à ne pas bloquer ou enrouler le câble de frein lors du montage (photo n°2).

- Contrôler l'état général, vérifier la présence, le serrage et le verrouillage de tous les éléments mécaniques.

- Procéder d'abord au réglage en hauteur du siège en insérant à l'avant vers l'intérieur du châssis les clips en U (photo n°4) à la position souhaitée et à l'arrière du châssis en réglant les boutons poussoirs.

⚠ Attention : Les 2 clips et les 2 boutons poussoirs doivent être tous les 4 positionnés au même niveau de réglage (photo n°2).

- Procéder ensuite au réglage en hauteur des poignées en vissant la molette (photo n°4) à la position désirée (au même niveau de chaque côté).

⚠ Attention : S'assurer que les 2 clips en U sont verrouillés, que les 2 molettes sont complètement vissées et que les 2 boutons poussoirs sont bien enclenchés. Ne pas positionner les doigts au niveau des zones de pliage.

- Clipser la barre dorsale à l'avant du châssis et vérifier son fonctionnement. Elle assure un soutien du dos en position assise.

- Pour replier le rollator (photo n°1), il suffit simplement de relever le siège et son support.

IMPORTANT :

- Le professionnel de santé doit s'assurer que le patient a les facultés mentales et physiques suffisantes pour utiliser en toute sécurité le rollator.
- Vérifier la stabilité du cadre du rollator et l'efficacité des freins et du verrouillage en position ouverte avant de le confier au patient.
- **Utilisation des freins (photos n°5) :** ils sont inopérants quand la poignée est en position horizontale. Pour freiner ou ralentir, tirer les poignées vers le haut. Pour immobiliser le rollator, pousser les poignées à fond vers le bas jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées.
- S'asseoir sur le siège uniquement depuis l'intérieur du rollator et non pas par le devant. Ne pas se mettre debout sur le siège.
- Ne pas mettre trop de poids dans le panier (maximum 5 kg) afin de conserver toute la mobilité et fonctionnalité du rollator et éviter tout basculement.

UTILISATION :

- Avant d'utiliser le rollator pour la première fois, vérifier que la hauteur des poignées est bien adaptée.
- Le positionner devant soi, tenir fermement les poignées tout en maintenant les freins. Lorsque le corps est en équilibre, relâcher les freins, pousser lentement le rollator vers l'avant puis freiner à nouveau (en tirant les poignées de frein vers le haut). Lorsque le rollator est parfaitement immobilisé, avancer à l'intérieur du cadre jusqu'à retrouver la position d'équilibre.
- Pour une station debout prolongée, immobiliser le rollator en poussant les poignées de frein vers le bas jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées. Pour débloquer les freins, remonter les poignées en position horizontale (photo n°5).
- **Avant chaque utilisation vérifier la stabilité, le freinage, le verrouillage de la barre dorsale et que le rollator est correctement verrouillé en position dépliée.**

ENTRETIEN RÉGULIER :

- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage.
- Vérifier régulièrement l'état du système de freinage, des roues, du siège et de la barre de dossier; les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
- Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage, des tubes, des soudures et l'efficacité du freinage.

Seul un technicien habilité peut procéder à la maintenance et au remplacement de pièces fournies exclusivement par Drive DeVilbiss Healthcare France.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur :  = 120 kg

Dimensions hors tout (l x p) : 62 x 62 cm **(photo n°2)**
Encombrement plié (l x p x h) : 62 x 24 x 94 cm **(photo n°1)**
Hauteur poignée réglable : de 83 à 100 cm [5 positions - pas = 2,5 cm]
Largeur utile entre roues arrière : 44 cm
Hauteur siège réglable : de 52 à 59,5 cm [4 positions - pas = 2,5 cm]
Diamètre roues (4 dont 2 pivotantes à l'avant) : 20 cm
Taille siège : 36 (à l'arrière) - 30 (à l'avant) x 24 cm
Couleur : rouge ou bleu métallisé
Matière : aluminium, plastique
Poids : 6,4 kg
Charge max. supportée par le panier : 5 kg

CONDITIONS DE GARANTIE :

La structure mécanique est garantie un an. Cette garantie correspond à un emploi normal de l'appareil et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Drive DeVilbiss Healthcare France.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.

SA1301200 - 03-2018 - rev.4



Distributeur : Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie - ZAC du Ban la Dame
BP19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tél : 03 83 495 495 - Fax : 03 83 495 496



Ralon Medical Equipment Co., Ltd
Xilian development zone, Jinsha, Danzao town,
528222 Foshan, Guangdong - CHINE

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE