





FICHE PRODUIT

LA 1ère GRUE DE COFFRE AMOVIBLE

Sans percer ou endommager le coffre Manipulation sans effort par système électrique



Entièrement démontable

Peut être retiré du coffre sans effort





Option Pack ERGO ATLAS

Batterie avion 10A ERGOCONCEPT et chargeur compatible



Utilisation du ERGO ATLAS

ETAPE 1 >>

Faire pivoter le mât vers l'extérieur du coffre jusqu'à la position la plus adéquate. Si nécessaire, utilisez le palan.



<< ETAPE 2

Branchez le câble d'alimentation du ERGO ATLAS à votre fauteuil ou scooter ERGOCONCEPT (ou directement à la batterie si Pack ERGO ATLAS).

ETAPE 3 **>>**

Utilisez la télécommande pour abaisser le crochet puis attachez-le solidement à l'endroit approprié sur votre fauteuil ou votre scooter.



« ETAPE 4

Levez la charge jusqu'au seuil du coffre puis faites pivoter avec précaution la potence vers l'intérieur du véhicule, avant de faire descendre la charge.





Caractéristiques techniques



| Poids (hors batterie) | Mât 5,6 kg Structure : 5,4 kg | ALIMENTATION | |
|-----------------------|---|-----------------|---|
| Longueur totale | 88 cm | Ergo Atlas | Par câble d'alimentation fourni, directement branché sur votre fauteuil ou scooter ERGOCONCEPT (batterie 24V 10A). |
| Largeur totale | 60 cm | | |
| Hauteur du mât | De 65 à 105 cm | Pack Ergo Atlas | Branchement sur batterie incluse dans le Pack Ergo Atlas (Réf.9E04 24V 10A). |
| Charge max. | 35 kg | | ATTENTION ! Utilisez votre Pack ERGO ATLAS uniquement avec les dispositifs électriques, batteries et chargeurs ERGOCONCEPT compatibles. |
| Compatibilité coffre | À VÉRIFIER AVANT ACHAT, selon votre véhicule. | | |

Voir tous les produits ErgoConcept sur www.ergoconcept.net

ERGOCONCEPT - 35, rue du Petit Bois - ZAC Les Platières - Bâtiment D - 69440 MORNANT - France

Tél : +33 477 40 09 97 - Fax : +33 426 29 90 11 - Email : contact@ergoconcept.net - www.ergoconcept.net

R.C.S LYON: 803 494 822 - Capital social: 60 000 € - Images non contractuelles soumises à modifications.

