

Lavabo avec miroir réglable en hauteur
REF. 822236





NOTICE D'INSTRUCTIONS


FR

I. Liste des pièces détachées

A : Vis à tête plate
M6* 15 [X12]



B : Vis M6* 15
[X20]

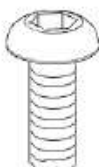


C: Joint en gel de
silice [X4]




D : Boulon
d'expansion [X4]



E : Clé hexagonale
[X1] 4MM

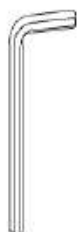

F : Alimentation
électrique [X1]

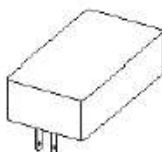


G : Boîtier de
commande [X1]




H : Tuyau de
descente [X1]



Module de lavabo
et de mains [X1]

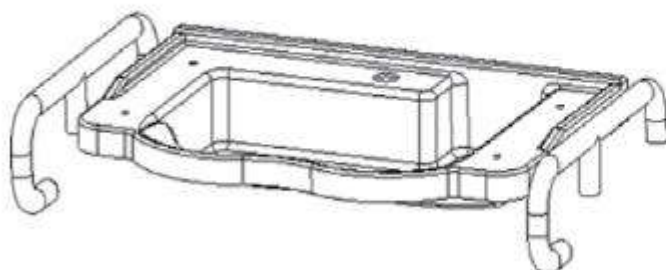


Module miroir en
nuage [X1]

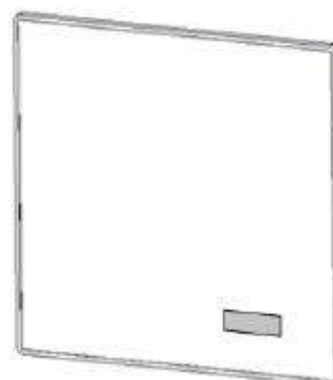

Conseil : Veuillez vérifier le nombre d'accessoires après le déballage.


- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> ① Support de levage X1 | <input type="checkbox"/> ② Pieds x2 | <input type="checkbox"/> ③ Support gauche X1 |
| <input type="checkbox"/> ④ Support droit X1 | <input type="checkbox"/> ⑤ Croix frontale X1 | <input type="checkbox"/> ⑥ Protection supérieure X1 |
| <input type="checkbox"/> ⑦ Protection inférieure X1 | <input type="checkbox"/> ⑧ Plaque fixe du miroir en nuage X2 | <input type="checkbox"/> ⑨ Plaque d'accrochage murale préinstallée X1 |

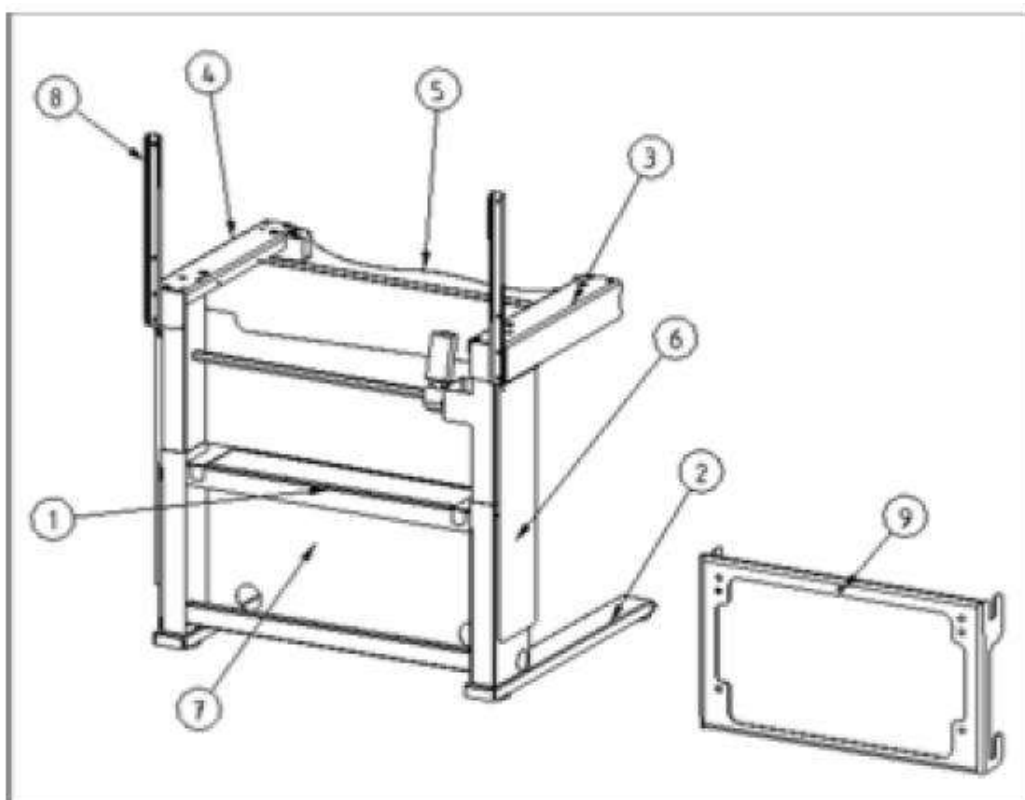

Remarque particulière : 2. Pied / 9. Plaque d'accrochage murale préinstallée
[l'une des deux est optionnel]


II. Etapes d'installation

1. Utiliser la [vis à tête plate A x 4] pour fixer la barre horizontale avant et les supports gauche et droit.

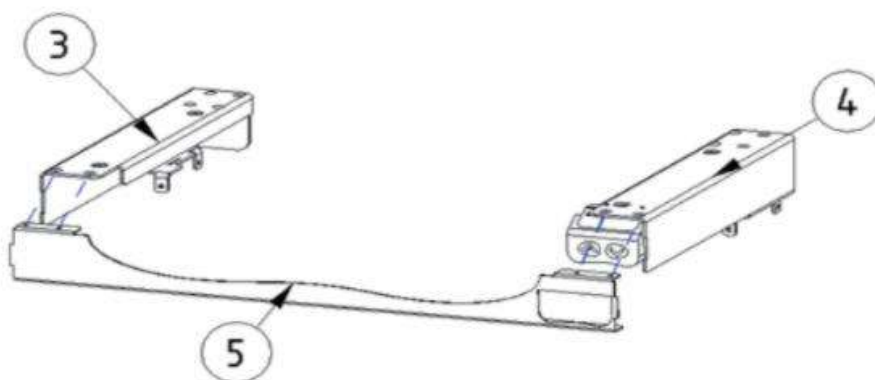


2. Bloquer l'ancrage X2 à l'extrémité inférieure des colonnes gauche et droite à l'aide des vis [B Vis M6* 15 x 8].

Une solution pour les pieds

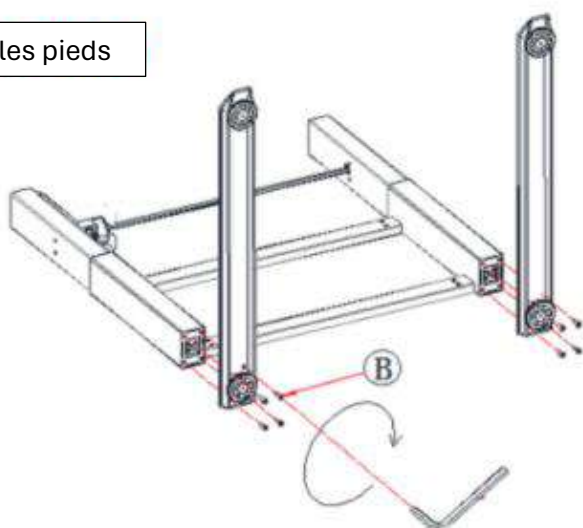


2-1. Placer la plaque d'accrochage préinstallée sur le mur à l'aide du [boulon d'expansion D x 4], puis accrocher la combinaison de colonnes dans la position correspondante.


Suspension murale

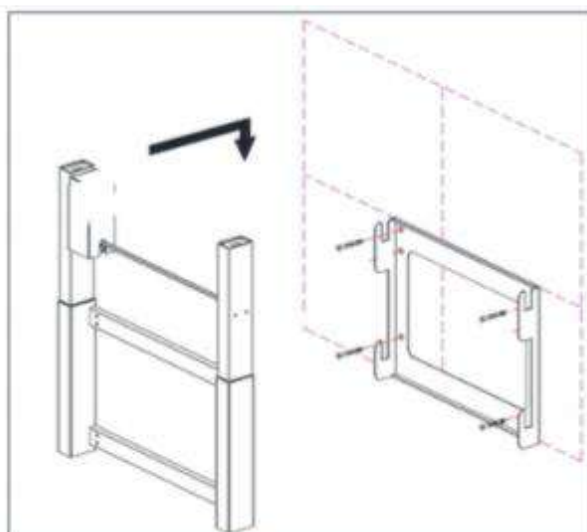


3. Placez la plaque de protection inférieure sur le module de la colonne. Notez que le crochet de la plaque de protection inférieure doit être accroché à la poutre de la colonne.

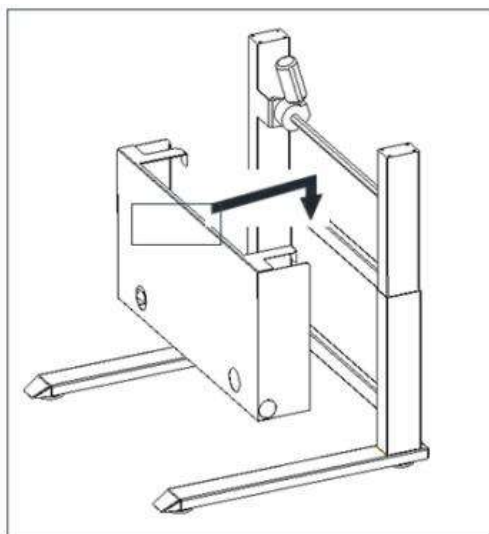

4. Verrouiller le support latéral précédemment installé sur les surfaces supérieures des poteaux gauche et droit à l'aide des [A. Vis à tête plate M6* 15 x 8].

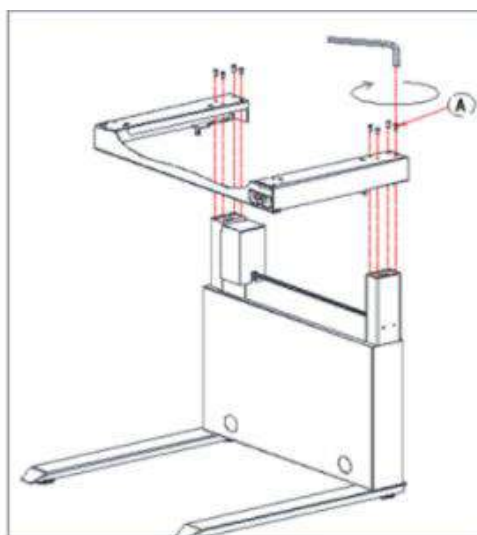

5. Insérer le câble du moteur et le câble d'alimentation F dans le boîtier de commande G.

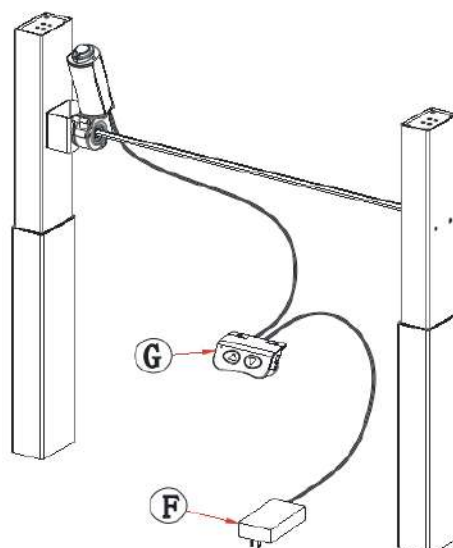


6. Utiliser les [vis B x 4] pour verrouiller la feuille de connexion du miroir en nuage X2 sur les supports gauche et droit.




7. Comme indiqué sur la figure : placez le miroir en nuage au-dessus du bassin et verrouillez le miroir en nuage et la pièce de raccordement à l'aide des vis [B x 4].


Branchez ensuite la fiche d'alimentation du miroir en nuage à la prise principale du module de levage.

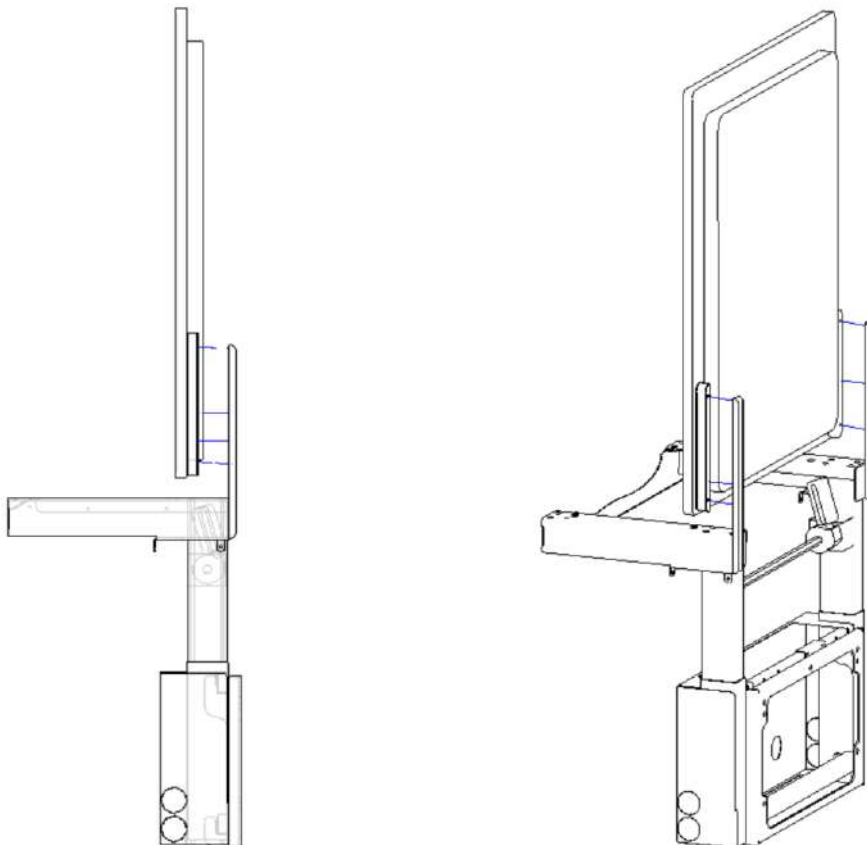

8. Assembler la barre de maintien, le bassin, le support latéral avec [C Joint en gel de silicone x4] et les vis X4 [barre de maintien avec vis].

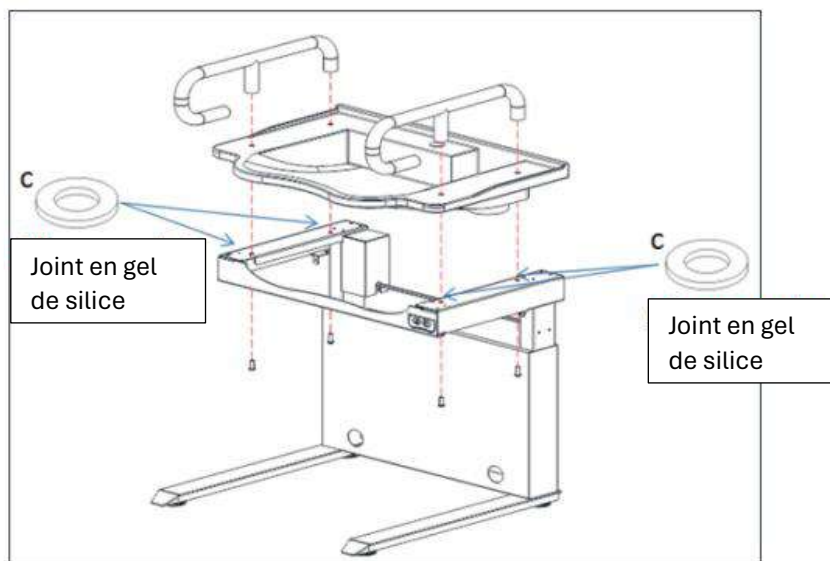


9. Installer les tuyaux d'évacuation et s'assurer qu'ils sont bien raccordés afin d'éviter les fuites d'eau.

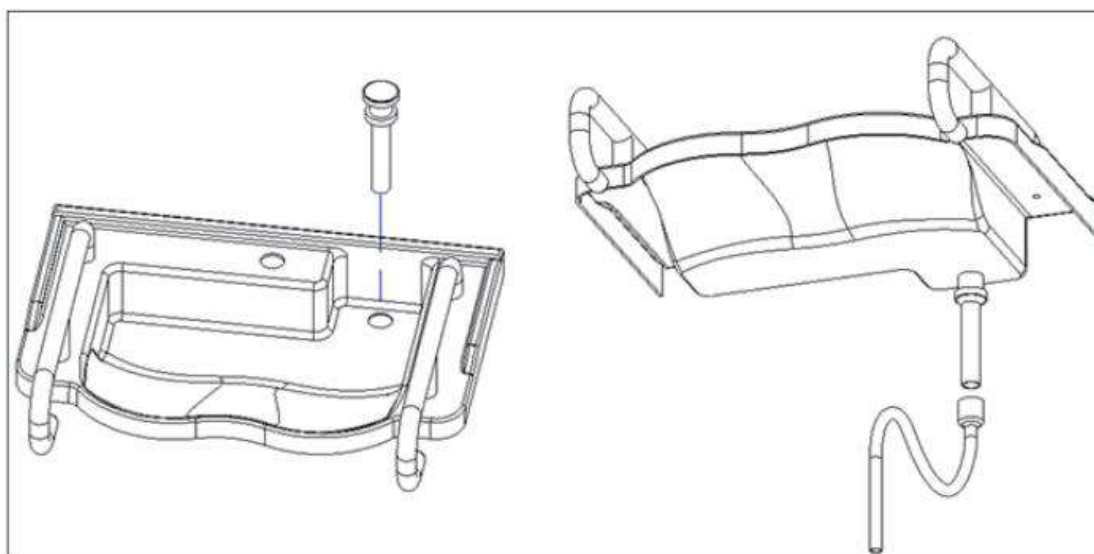


10. Comme le montre la figure, assurez-vous d'abord de brancher l'alimentation électrique du miroir en nuage et l'alimentation électrique du contrôleur de levage du bassin.


La ligne d'égout est également branchée. Ensuite, insérez la plaque de protection supérieure dans les fentes correspondantes des supports gauche et droit, et verrouillez-la à l'aide des vis [B x 4].

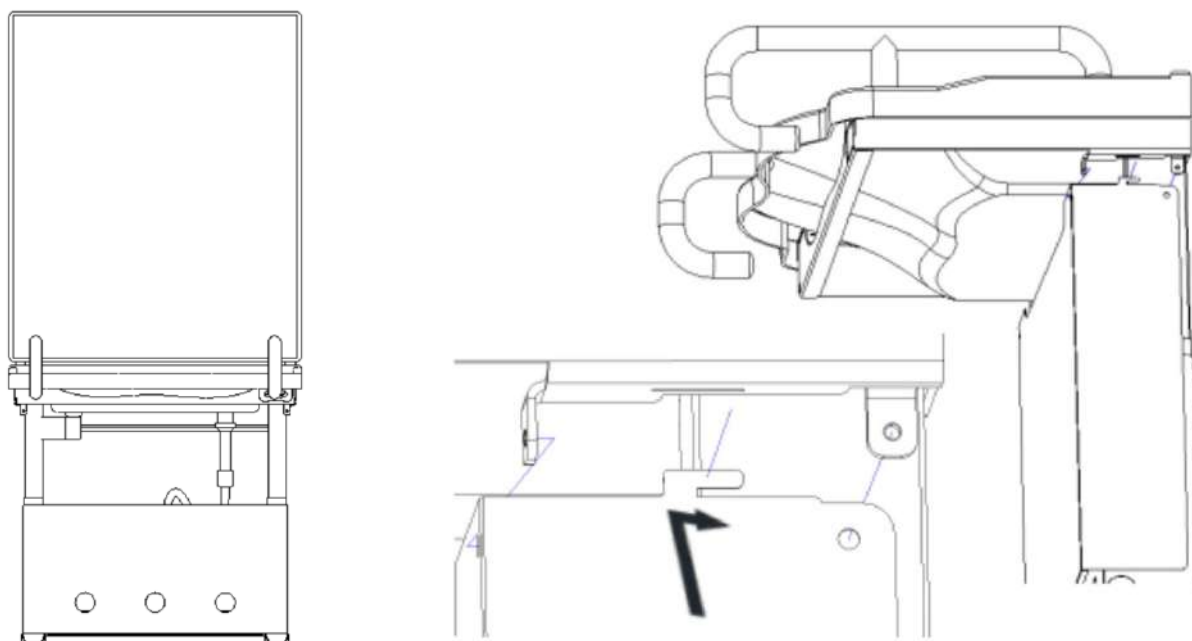

Précautions : Dans le cas d'une installation murale, le robinet de sortie sur le mur doit se situer dans les deux plages suivantes avant l'installation : plage d'installation de la vanne de sortie d'eau 1 : la hauteur du bord de la vanne de sortie d'eau par rapport au sol est comprise entre 70mm~280mm, et les largeurs gauche et droite sont de 450mm.

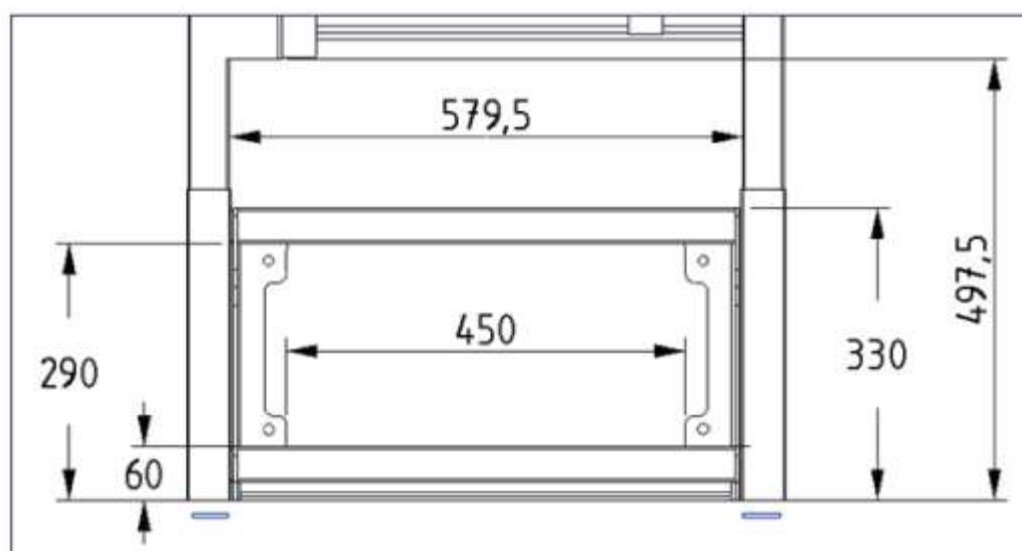

III. Description du contrôleur manuel

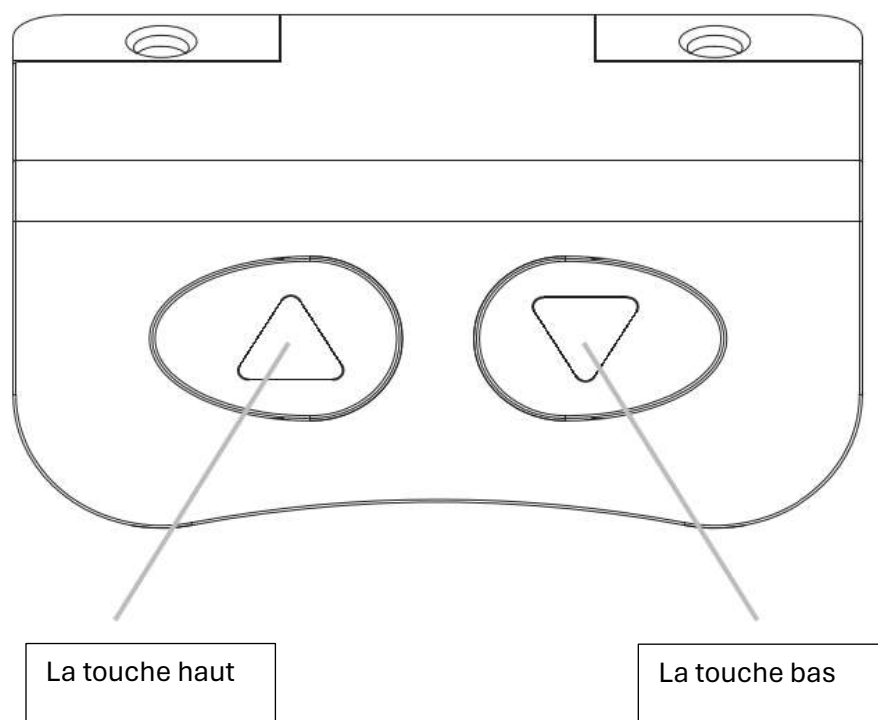

IV. Autre description de l'affichage



Réinitialisation RST

1. Le contrôleur est en état de réinitialisation.
2. Si la hauteur affichée est différente du bureau réel, vous devez réinitialiser manuellement le bureau.
3. Lorsque le bureau est incliné ou qu'un ERR ou un défaut se produit, appuyez sur la touche pour entrer automatiquement dans la réinitialisation.

V. Mode d'emploi

Remise à zéro

Colonne de réinitialisation : Maintenir la touche "v" enfoncée jusqu'à ce que le moteur s'arrête, maintenir la touche "v" enfoncée pendant 5 secondes, maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que le contrôleur émette un signal sonore indiquant que la réinitialisation est terminée.

Lorsque la colonne est réinitialisée en position 4 haute, maintenir la touche "V" pendant 7 secondes et la relâcher, la colonne se réinitialise automatiquement sans opération manuelle.

Limite haute et basse

2.1. La méthode de réglage est la suivante : Réglez la hauteur actuelle sur la hauteur limite du bureau et maintenez les touches 'Λ' + 'V' pendant 5 secondes. Une annonce se fait alors entendre, indiquant que la hauteur limite du bureau a été réglée avec succès.

2.2. Méthode de réglage de la limite haute/basse : lorsque le bureau se trouve dans la moitié supérieure du trajet, la limite est haute. Lorsque le bureau se trouve dans la moitié inférieure du trajet, la limite est basse. [Méthode spécifique : $N450 \div 2 = 22,5$; hauteur minimale $70,0 + 22,5 = 92,5$, c'est-à-dire 92,5 peut être fixé en dessous de la limite inférieure, 92,5 peut être fixé au-dessus de la limite supérieure].

2.3. Annuler la méthode de la limite haute/basse. Lorsque le bureau se trouve dans la partie inférieure, maintenez les touches 'Λ' + 'V' pendant 5 secondes. Lorsque le bureau se trouve dans la partie supérieure, maintenez enfoncée les touches 'Λ' + 'V' pendant 5 secondes, et la tonalité de l'avertisseur sonore se fait entendre, indiquant que la limite haute du bureau a été annulée avec succès.

VI. Service après-vente et maintenance

Garantie :

1. Dans les trois mois à compter de la date de vente, en cas de défaut de performance, les produits eux-mêmes et l'emballage extérieur doivent être garantis.

Tenue intacte, pas de rayures, peuvent être remplacés par des produits du même type (sous réserve d'inspection), à l'exclusion des dommages.

2. Le produit est garanti pendant un an à compter de la date de vente. L'entretien et les accessoires n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

3. Le service de garantie n'est valable que dans le cadre d'une utilisation normale.

4. Tous les dommages artificiels, l'auto-démontage de la machine, le décachetage de l'étiquette, l'utilisation incorrecte, et autres dommages externes ne sont pas couverts par la garantie, la carte doit être fournie pendant la période de garantie.

Si la carte n'est pas fournie ou si elle est modifiée sans autorisation, l'entreprise a le droit de procéder à un traitement non-garantie.

***Distribué par/Distributed by :
IDENTITES
Boulevard de la Chanterie – ZA Pôle 49
49124 Saint Barthelemy d'Anjou
Téléphone : 02.41.96.18.48***