

Déambulateur 3 roues en aluminium

Instructions d'utilisation et de maintenance

Avertissement de sécurité

Veillez à lire et à suivre attentivement ces instructions. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Poids maximal utilisateur



1.0 Usage prévu

Le déambulateur léger en aluminium à 3 roues est conçu pour apporter un soutien et une aide aux personnes qui ne peuvent pas, ou n'ont pas la confiance nécessaire pour, marcher sans être guidées. Ce rollator est destiné à un usage intérieur et extérieur.



Image 1: Déambulateur monté

2.0 Sécurité

Le poids de l'utilisateur ne doit pas dépasser les 115kg. Vérifiez que le déambulateur est verrouillé en position ouvert avant utilisation (voir 4.1).

A utiliser uniquement comme aide à la marche en avant. N'effectuez pas de réglages sur le déambulateur s'il n'est pas à l'arrêt.

Ne pas utiliser dans les escaliers et escalators et faire attention dans les pentes raides.

Ne suspendez pas d'objets aux poignées, car cela gênerait la stabilité du déambulateur.

Le poids maximal de la charge pour le sac du déambulateur ne doit pas être supérieur à 5 kg.

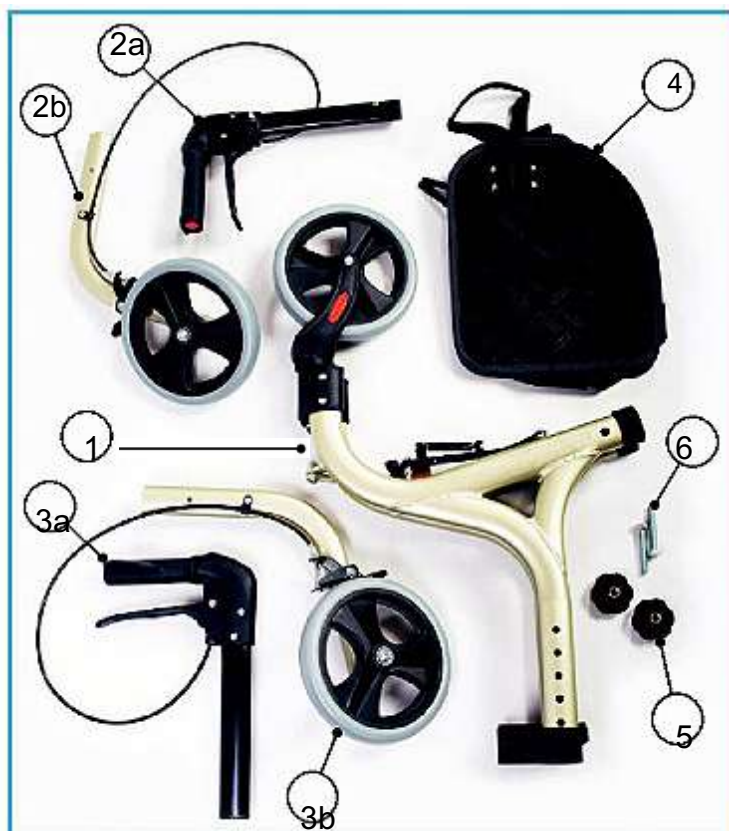


Figure 2: Pièces

3.0 Déballage

Retirez l'emballage et vérifiez soigneusement toutes les pièces. Contactez immédiatement votre fournisseur si des pièces sont manquantes ou endommagées et n'essayez pas de les assembler.

Contenu :

1. Cadre & roues avant x 1
- 2a. Poignée RHS & 2b. Roue arrière RHS x 1
- 3a. Poignée RHS & 3b. Roue arrière RHS x 1
4. Sac x 1
5. Boulon de serrage x 2
6. Visses x 2

4.0 Assemblage

4.1 Déplier le déambulateur :

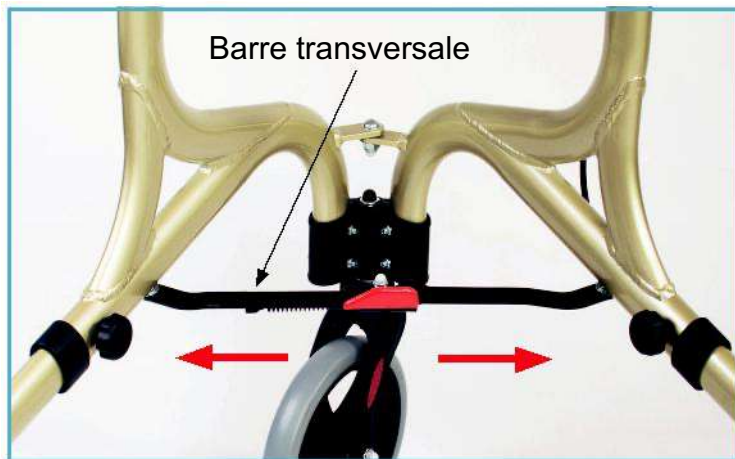


Figure 3: Déplier le déambulateur

1. Référez-vous aux images 2 et 3. Tirez doucement sur le cadre principal jusqu'à ce que le ressort bloque la barre transversale en position ouverte.

4.2 Fixation des roues:

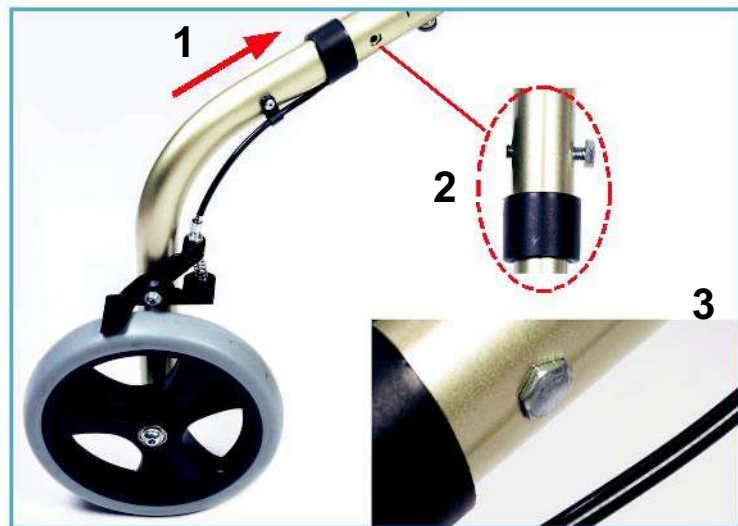


Image 4: Fixation des roues

1. Référez-vous aux images 2 et 4. Insérez le tube du cadre de roue RHS dans le tube du cadre principal RHS.

Note : Le mécanisme de freinage de la roue arrière doit être orienté vers le côté extérieur du rollator.

2. Alignez les trous et insérez les boulons.
3. Assurez-vous que la visse de la manivelle a été placée dans la fente hexagonale.

4. Se reporter à l'image 5. Fixer le volant (article 5) au boulon du volant (article 6) et le serrer.
- Note :** Assurez-vous que le boulon de serrage est situé sur le côté interne du cadre.
5. Faites de même pour l'autre roue.

4.3 Fixez les poignées :

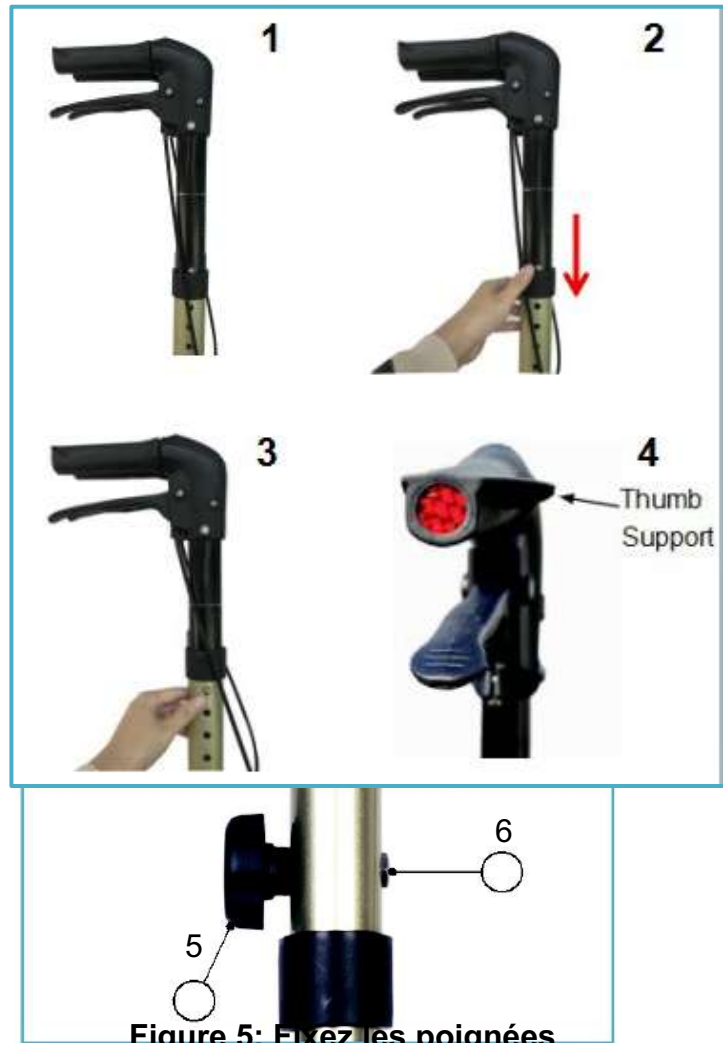


Figure 5: Fixez les poignées

Figure 6: Fixation des poignées

1. Reportez-vous aux images 2 et 6. Insérez le tube de la poignée RHS dans le tube RHS du cadre principal.
2. Poussez et maintenez le bouton-clip de la poignée, puis poussez la poignée jusqu'à ce que le bouton-clip s'enclenche en position dans le premier trou.
3. Réglez la hauteur de la poignée à la bonne hauteur. La poignée doit être alignée avec vos

4. poignets, en position debout, les bras détendus le long du corps.
 5. Assurez-vous que le support de pouce de la poignée est orienté vers le côté interne.
- Note:** Le réglage de la poignée se fait par incréments de 25 mm, de 820 mm à 920 mm.
6. Pour régler la poignée, appuyez sur le bouton-clip et maintenez-le enfoncé, puis abaissez-la à la hauteur voulue. Laissez le bouton-clip s'enclencher dans le trou de réglage le plus proche pour fixer la poignée.

Note: Veillez à ce que le bouton soit pleinement enclenché dans le trou.

4.4 Installation du sac :

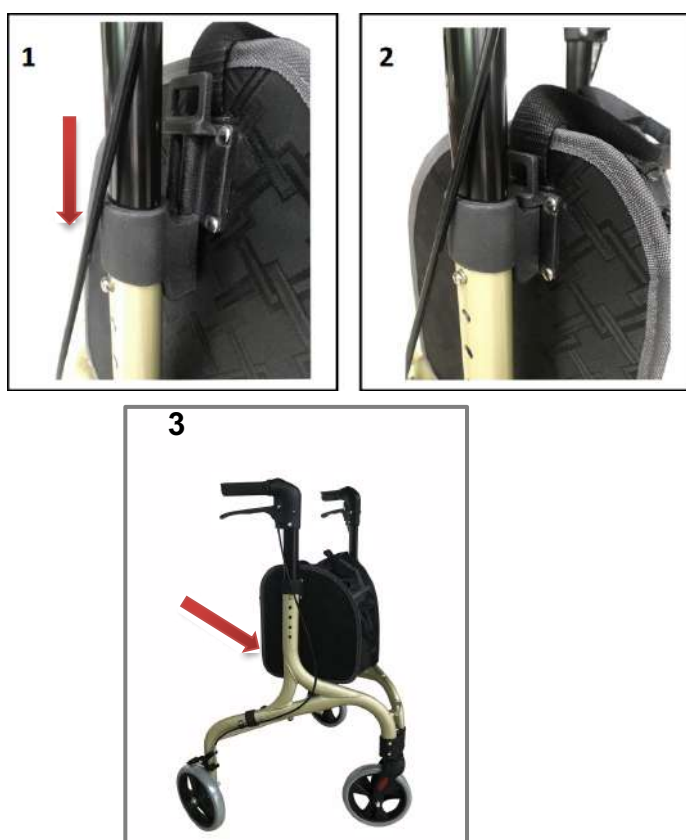


Figure 8: Installation du sac

1. Reportez-vous à l'image 8. Insérez l'un des supports en T situés sur le côté du sac dans la fente située en haut du cadre principal.
- Note :** Les poches à bagages doivent être placées à l'arrière du rollator, face à l'utilisateur.
2. Répétez l'opération de l'autre côté du sac.
 3. Fixez le sac avec la sangle de sécurité.

5.1 Utilisation des freins

 Les freins doivent être vérifiés avant la première utilisation, le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

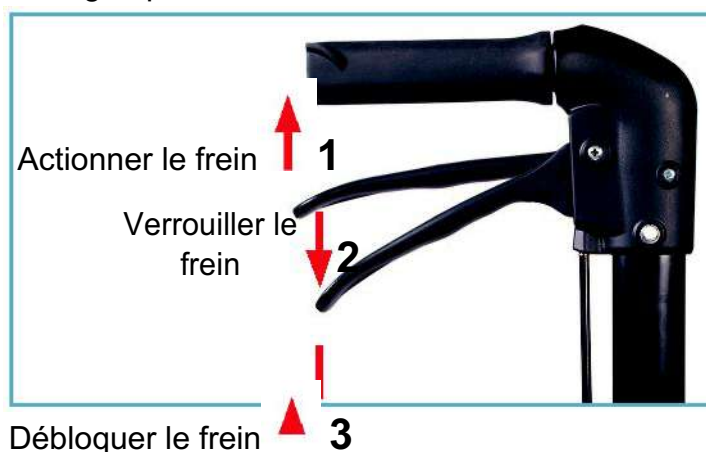


Image 9: Utilisation du frein

5.2 Actionner le frein

1. Pressez le levier de frein vers le haut pour appliquer le frein. Relâchez le levier pour relâcher le frein

Note: Les freins sont actionnés indépendamment.

5.3 Verrouiller le frein:

Appuyez sur le frein jusqu'à ce qu'il se verrouille.

5.4 Déverrouiller le frein:

3. Tirez sur le frein jusqu'à entendre un clic.

Note: Pour ajuster le frein, référez-vous à la section 7.1.

5.5 Plier le déambulateur :

Voir la partie 4.5 et l'image 8. Si le sac est plein, détachez la sangle de sécurité du sac, puis retirez le sac en le soulevant à l'aide de la poignée. Les supports en T doivent se dégager des fentes du sac des deux côtés.

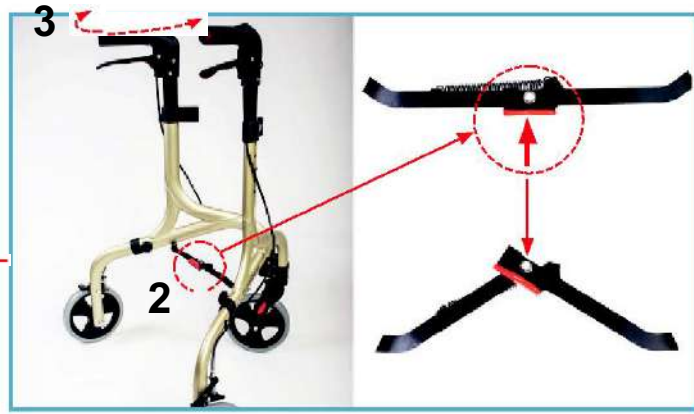


Figure 10: Pliage du déambulateur

2. Poussez doucement la barre transversale vers l'avant pour libérer le verrou à ressort.
3. Pressez les poignées ensemble pour plier le rollator.

6.0 Lavage

1. Assurez-vous que toutes saletés soient retirées des roues, de l'essieu et des freins.
2. Pour laver le sac, utiliser simplement un chiffon humide.
3. Nettoyez régulièrement le cadre en utilisant un détergent neutre d'usage général et de l'eau chaude.
4. Veuillez vérifier l'adéquation des produits de nettoyage avant de les utiliser. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de chiffons abrasifs, car ils pourraient endommager la surface de façon permanente et invalider toute garantie.
5. Laissez toujours le produit sécher complètement avant de l'utiliser ou de le stocker.

7.0 Maintenance



Veillez contacter votre fournisseur en cas de besoin pour l'entretien du déambulateur. Des réglages incorrects peuvent entraîner des blessures graves.

1. Vérifiez que tous les clips sont bien enclenchés et que les deux poignées sont bien fixées.
2. Vérifiez que les roues tournent sans accros.
3. Vérifiez l'usure générale ou la casse. Tout défaut suspect doit être immédiatement signalé au fournisseur et le produit doit être mis hors service.
4. Vérifiez que les freins fonctionnent correctement. Lorsque vous appuyez sur les poignées de frein, les deux roues arrière ne doivent pas pouvoir tourner.

7.1 Réglage des freins :



La section suivante demande quelques connaissances techniques. N'essayez pas d'effectuer le réglage si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire.

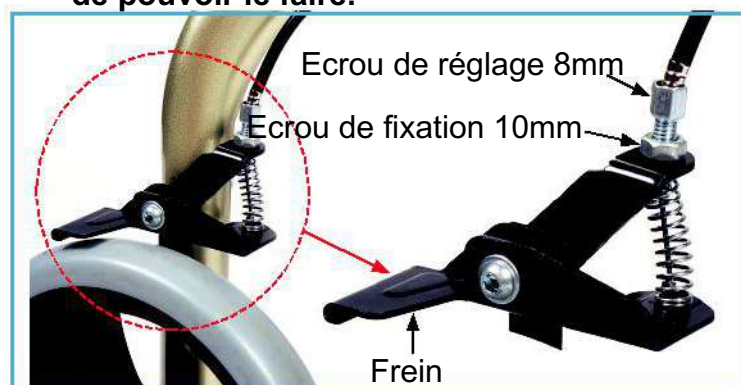


Figure 11: Réglage des freins

1. Reportez-vous à la figure 11. L'écrou de réglage du frein est situé au bas du câble de frein, au-dessus de la roue arrière, des deux côtés.
2. Utilisez une clef pour desserrer l'écrou de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Utilisez une clef de 8 mm pour serrer/desserrer l'écrou. Pour serrer les freins, tournez l'écrou de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Note: Il doit y avoir un petit espace entre le mécanisme de freinage et la roue, lorsque le levier de frein est relâché.

4. Utilisez une clé de 10 mm pour serrer l'écrou de blocage dans le sens des aiguilles d'une montre.

Note: Utilisez la clé de 8 mm pour vous assurer que l'écrou de réglage reste en position, tout en serrant l'écrou de blocage.

5. Testez les freins conformément à la section 5.1.
Note : Des freins mal réglés peuvent s'avérer dangereux. Veuillez contacter le vendeur si vous avez besoin d'aide.

8.0 Se débarrasser du déambulateur

Ce produit doit être entièrement lavé avant d'être remis.

Ce produit est fabriqué à partir de métal et de plastique et peut être remis à un centre de traitement et de recyclage des déchets.

9.0 Garantie

Nous assurons une garantie de 1 an pour ce produit, à partir de la date d'achat, en cas de tout défaut de conception.

Cette garantie ne couvre donc pas le produit en cas de mauvaise utilisation ou s'il a subi des coups.

Toute garantie émise n'affecte pas vos droits statutaires.

